

コントロール HBT 製品説明書

名称

コントロールHBTは、HBT1 (low)、HBT2 (medium)、HBT3 (high) の3種類の既知濃度からなり、各濃度1ボトルは赤色の染料を含む、コントロール液です。

コントロール HBT1 (low)	2本入り
コントロール HBT2 (medium)	2本入り
コントロール HBT3 (high)	2本入り

容器・包装

プラスチック製ボトル

容量

各1.9mL

保存条件

開封前：2～25℃で保存

開封後：2～35℃で保存

有効期限

開封前：期限は容器ラベルに記載（約半年）

開封後：2ヶ月

※コントロール液の安定性を保つために、開封後、キャップは確実に閉じて下さい。

各製品の濃度

容器ラベルに記載（ロットによる）。

使用目的

コントロール HBT は、ヘモグロビン分析装置「コンポラブ TS」の精度確認に使用することを目的としたコントロール液です。当該コントロールは「コンポラブ TS」以外には使用できません。

使用方法

使用前に必ず、「コンポラブ TS」の添付文書、取扱説明書、および「コンポラブ TS キュベット」の製品説明書をお読み下さい。

1. 容器を「コンポラブ TS」の使用環境（15～35℃）に置きます。
2. 容器内のコントロールを泡立てないように、穏やかに転倒混和します。
3. 容器を初めて開封する場合は、最初の一滴は廃棄して下さい
4. 清潔な疎水性のプラスチック製プレート等に滴下します。「コンポラブ TS 用キュベット」で採取するのに十分な量を滴下して下さい。
5. 滴下後、速やかにコントロール液を採取し、「コンポラブ TS」のキュベットホルダーに載せ、測定を行います。
6. 容器の口やキャップに付着したコントロールを、清潔な布等で拭き取り、速やかに容器のキャップを閉じます。
7. 測定値が容器、ラベルに記載値の範囲から逸脱する場合は、以下の点を確認した上で再測定を行って下さい。
 - 1) 測定が正しく行われたかどうか
 - 2) 本製品の有効期限が過ぎていないか
 - 3) 保管温度が適切であったかそれでも問題が解決しない場合は、弊社もしくは取扱代理店にご連絡下さい。

問い合わせ先

本製品は、DiaSpect Medical 社の仕様に基づき製造されています。ご不明な点がありましたら、フレゼニウスカービジャパン株式会社までご連絡下さい。

輸入販売

フレゼニウスカービジャパン株式会社

住所：東京都品川区北品川四丁目7番35号
御殿山トラストタワー

TEL：03-3280-3211

FAX：03-3280-3212