



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



CompoCool

Kjøleplater

Fresenius Kabi CompoCool system har som formål å avkjøle nytappet fullblod (37°C) til 20°C og holde denne temperaturen lengst mulig.

CompoCool kjøleplater fungerer som transportsystem av fullblod fra tapperom til komponentavdeling.

CompoCool kjøleplater

Produktinformasjon

Størrelse

Kjøleplater

L x B x H 45,6 x 33,3 x 2,5 cm
Vekt 3 kg

Plastkasse

L x B x H 60 x 40 x 12 cm

Produktkoder

CompoCool kjøleplate	902 425 1
CompoCool plastkasse	902 426 1
CompoCool transportvogn	902 427 1
Drastang til transportvogn	902 454 1

CompoCool kjøleplate leveres i pakning av 4 stk.

CompoCool kjølesystem har kapasitet til å kjøle ned 8 enheter fullblod til 20°C (+/- 2°C) innen 3 timer. Under normale forhold (18-25°C og stille luft) kan 20°C opprettholdes i ca 20 timer.

Plasser fullblodsposen med etiketten opp slik at posen har direkte kontakt med kjøleplaten for å oppnå best effekt.

Kjøleplatene plasseres i kjøleskap i 12-16 timer for nedkjøling. Når kjøleplatene tas ut av kjøleskapet la de ligge i 30 minutter (oppnår 15°C) før man legger fullblodsposen på, for å unngå risiko for hemolyse.

Det finnes 2-fargede plastkasser til å oppbevare CompoCool kjøleplater i, sammen med blodposene. Plastkassene kan stables med blodposer i når fargene ikke er på samme side. (se bilde nede til høyre)

Når fargene er på samme side stables kassene for oppbevaring uten blodposer.



Ta kontakt for ytterligere informasjon eller tilbud



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 4646 Nydalen, 0405 Oslo
Telefon 22 58 80 00
markedsavdelingen@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.no