
SERINGA INJECTOMAT COM CÂNULA



BRLM93000020/ M93000020 - Seringa Injectomat Âmbar com cânula

BRLM93000000/ M93000000 - Seringa Injectomat com cânula

VERSÃO DE INSTRUÇÃO DE USO: BRM930000/V01

REVISADO EM: 20/07/2022

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO



PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO (IFU) TAMBÉM EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR ATRAVÉS DO SAC 0800-707-3855 OU ATRAVÉS DO E-MAIL FRESENIUS.BR@FRESENIUS-KABI.COM

MODO DE USO DO PRODUTO:

1. Verifique a integridade das embalagens unitárias;
2. Abra a embalagem através da técnica asséptica;
3. Verifique se a cânula está conectada adequadamente antes do uso;
4. Mantenha a cânula coberta com o protetor até o momento do uso para evitar danos à ponta e contaminação da agulha;
5. Prossiga com a aspiração do conteúdo a ser infundido, respeitando as recomendações de assepsia de seu local de trabalho;
6. Após preencher a seringa com o conteúdo necessário, remova a cânula da mesma, de forma que a seringa possa ser encaixada corretamente na bomba de infusão.

ATENÇÃO

Cuidado na hora de descartar a cânula. Recoloque o protetor nas agulhas utilizando técnica passiva de recolocação, isto é, não segurando o protetor da agulha durante a recolocação, e não forçando-o contra a ponta da agulha, evitando que esta penetre o protetor. Siga as recomendações do serviço de saúde para a prevenção de acidentes com perfurocortantes.

6. Ao terminar o procedimento de infusão, a seringa também deve ser descartada em local adequado, conforme requisitos da legislação sanitária vigente, e recomendações do serviço de saúde.

PRECAUÇÕES RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO, BEM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Não utilizar após a data de validade.
 - Produto médico de uso único.
 - Este dispositivo é estéril.
 - Proibido reprocessar.
 - Destruir após o uso.
 - Manter em temperatura ambiente e em local protegido da umidade.
 - Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada.
-

SERINGA INJECTOMAT COM CÂNULA

ATENÇÃO

A cânula da seringa Injectomat deve ser utilizada somente para aspiração de medicamento para preenchimento da seringa. Não é permitido seu uso para administração da medicação no paciente, o mesmo será administrado através de bomba de infusão com o uso de extensores que se conectam ao acesso venoso.

INDICAÇÕES

As seringas Injectomat são indicadas para o uso com bombas de infusão de seringa. São seringas de uso único para infusão de drogas e podem ser utilizadas com extensores para infusão em Bomba de Seringa. São dispositivos para infusão compatível com bombas de seringa com o uso de extensores / perfusores.

CONTRAINDICAÇÕES

- Não se aplica.

FABRICADO POR:

Fresenius Kabi AG

Else Kröner-Str. 1

61352, Bad Homburg Alemanha

IMPORTADO / DISTRIBUÍDO POR

Fresenius Kabi Brasil Ltda.

Av. Marginal Projetada, 1652

Barueri-SP

C.N.P.J. 49.324.221/0001-04

SAC: 0800 707 3855

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Cíntia Motta Pereira Garcia

CRF-SP: 34.871

Registro ANVISA nº 80145119023

Estéril – Óxido de Etileno

Produto de uso único. Proibido reprocessar

Armazenar em temperatura ambiente e em local protegido da luz e umidade.

Lote, Data de fabricação e Data de validade: vide rótulo do produto.

