

お客様各位

フレゼニウスカービジャパン株式会社
東京都品川区東品川三丁目 32 番 42 号

「経腸栄養ポンプ Amika」の取扱説明書について


謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素より、「経腸栄養ポンプ Amika(以下、Amika)」をご愛顧いただきありがとうございます。
さて、本製品の取扱説明書の表記誤字がありましたので、訂正のご案内をさせていただきます。
お客様におかれましては、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い致します。

謹白

記

[対象器] 販売名：経腸栄養ポンプ Amika 認証番号：22600BZX00433000

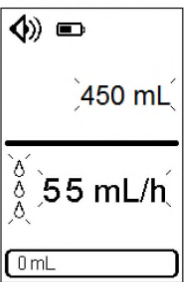
[訂正内容] アラーム発報と Amika の動作状態についての訂正

アラーム	アラーム種類	誤	正
黄色 LED の点滅アラーム音 (連続 2 回のビーブ音)	 情報信号	投与は続行	投与なし アイドル状態を継続

[訂正内容の補足]

本アラームの発報機序は下図で示す通りです。投与の「開始忘れ防止」によるアラームのため、投与は開始されていませんので、Amika の動作状態を表すと「投与なし アイドル状態を継続」となります。
また、本アラームは、投与が開始されるまで 2 分毎に発報され続けます。

情報信号 - 黄色LEDが点滅

開始忘れ防止	ポンプの電源入力後、2分間操作がされていない (2回のビーブ音)	■ 次の操作に進むか、ポンプの電源を切ります。
 <p>注：目標投与量/投与速度/ポンプ状態が点滅します。</p>		

[取扱説明書記載箇所]

取扱説明書の版により記載箇所が異なりますので、下表の通り表紙デザインの違いにてご確認ください。

<p>表紙 デザイン</p>		
<p>項目</p>	<p>7.1.1 様々な情報信号とアラーム</p>	<p>8.1.1 様々な情報信号とアラーム *最新版の取扱説明書は修正済です。</p>

- お問い合わせ先

[製造販売元] フレゼニウスカービジャパン株式会社 (TEL) 03-6435-7614

[販売元] 株式会社 ジエイ・エム・エス

以上