



free/flex® adapter (stål/stål).  
Varenr. 2870041



Fjern yderposen og læg  
infusionsposen på bordet.  
Knæk beskyttelsesvingen  
på den hvide port af lige  
inden brug



Posen holdes lodret, og  
derefter trykkes den smalle  
ende af free/flex® adapteren  
fast på tilsætningsporten



**Pres** hætteglasset med  
lægemiddel i den åbne (brede)  
ende af adapteren .  
Undgå tryk på posen



Pres infusionsvæsken over i  
i hætteglasset for at opløse  
lægemidlet



Når lægemidlet er opløst,  
vendes systemet, så  
hætteglasset er øverst.  
Tryk på og slip infusions-  
posen flere gange, indtil  
hætteglasset er tomt



Posen håndteres nu kun  
ved at holde med fingrene  
på ophængningshullet.  
Dette for at undgå  
tilbageløb af medicin i  
hætteglasset



Posen med hætteglasset  
kan nu hænges op